

# ชุดทดสอบ THC ในสารสกัด (Extracted oil) และน้ำมันกัญชา เทส กัญ (Test Kann)



## ประเภทตัวอย่างทดสอบ



สารสกัด (ชนิดยางเหนียว) และน้ำมันกัญชา  
เพื่อทดสอบว่ามีสาร THC มากกว่าร้อยละ 0.2  
หรือไม่  
(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  
พ.ศ. 2565)



## อุปกรณ์ในชุดทดสอบ



ตัวทดสอบ



สารสกัด 1



สารสกัด 2



ช้อนพลาสติก



หลอดหยด



แท่งไม้ (สำหรับคนตัวอย่าง)

## ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบ



นำตัวอย่างสารสกัดกัญชาชนิดเหลวใส่ช้อน  
จนเต็ม 1 ช้อน ในกรณีที่ตัวอย่างเป็น  
ยางเหนียว ตักตัวอย่างเพียง 1/2 ช้อน




เทตัวอย่างจากช้อนทั้งหมดใส่ลงในหลอด  
สารสกัด 1 (กรณีที่ตัวอย่างเป็นยางเหนียว  
ใช้แท่งไม้เพื่อช่วยคนตัวอย่างให้เข้ากัน)




เขย่าหลอดสารสกัด 1  
จนสารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน



ใช้หลอดหยดดูดสารสกัด 1 ขึ้นมาจนถึง  
ขีดที่กำหนด และหยดลงในหลอด  
สารสกัด 2

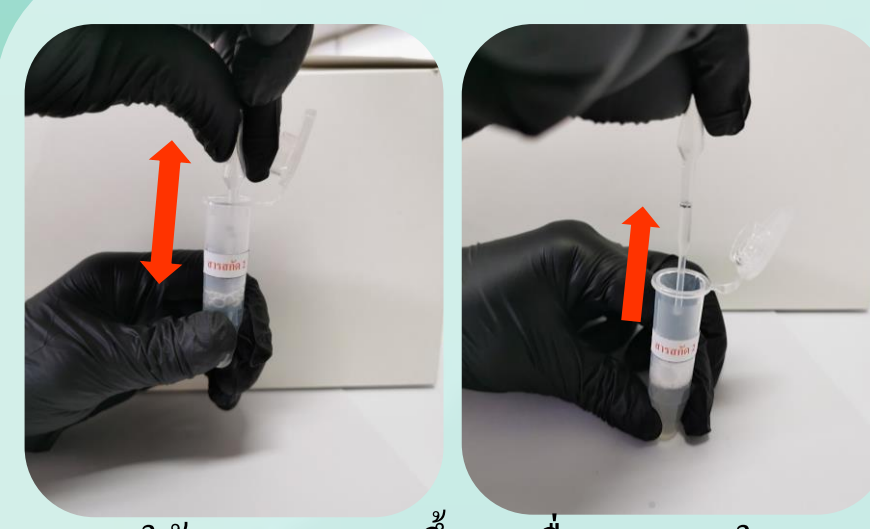


ใช้หลอดหยดดูดขึ้นลงเพื่อผสมสารในหลอด  
สารสกัด 2 และปิดฝา เขย่าให้เข้ากัน จากนั้น  
ใช้หลอดหยดอันเดิมดูดสารสกัด 2 ขึ้นมา  
จนถึงขีดที่กำหนด

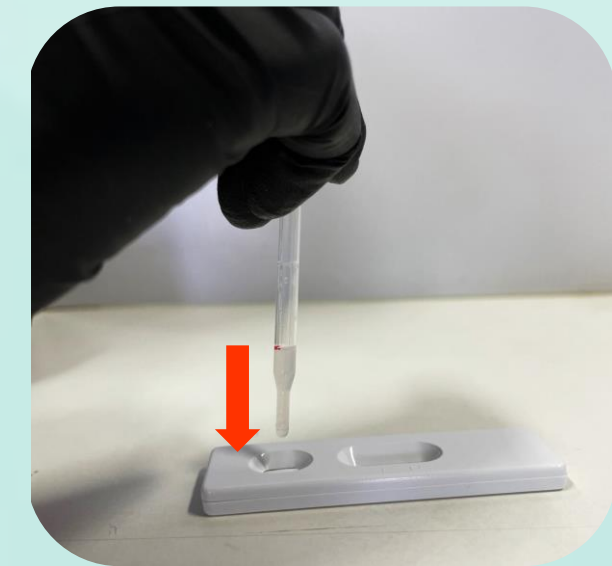


หยดสารสกัด 2 ลงในหลุมของตัวทดสอบ  
และรอผลการทดสอบเป็นเวลา  
15 - 20 นาที

## การแปลผล

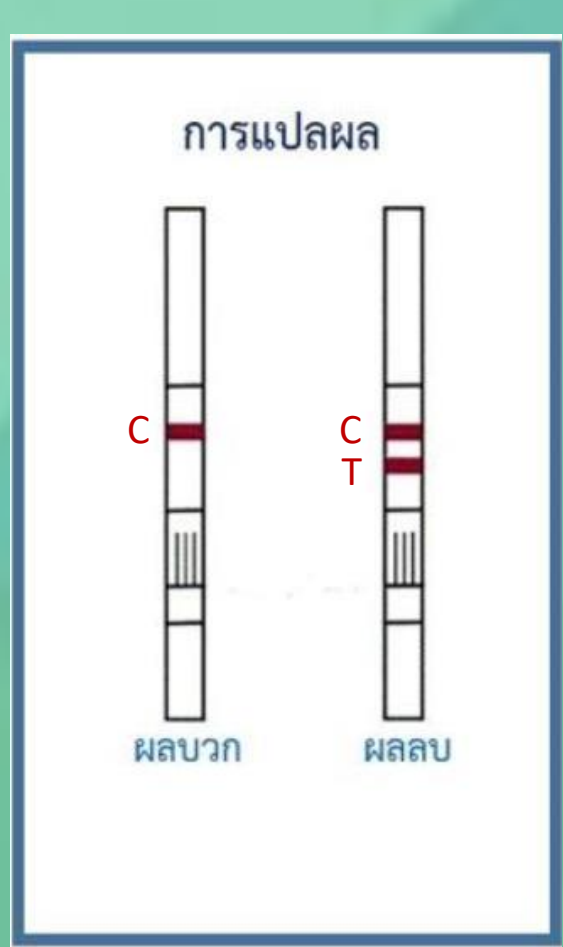

- **ผลบวก:** แถบทดสอบขึ้น 1 ขีด (C)  
→ THC **เกินร้อยละ 0.2**
- **ผลลบ:** แถบทดสอบขึ้น 2 ขีด (C และ T)  
→ THC **ไม่เกินร้อยละ 0.2**

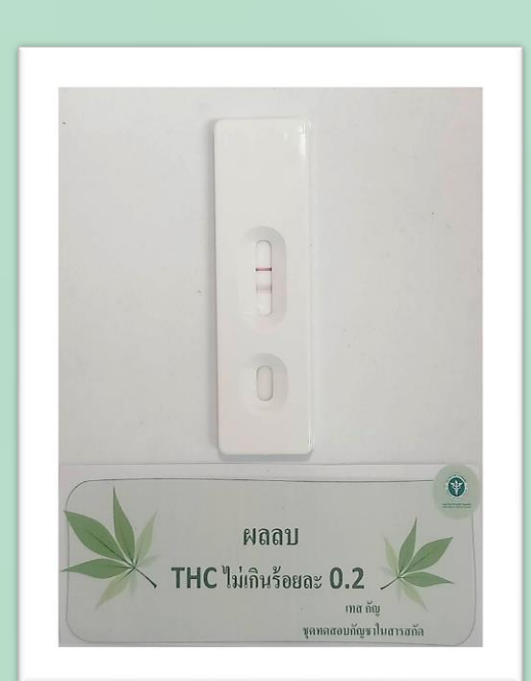

หมายเหตุ: 1) ในกรณีที่แถบ C ไม่ปรากฏ จะไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้  
2) ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจเบื้องต้น (Screening test) เท่านั้น  
ไม่สามารถนำไปดำเนินการตีทางกฎหมายได้

